

Rassodamento cutaneo dell'area interna brachiale

Per gentile concessione del Dr. Alessio Gessati, Milano, Italia

Con la **Dermaelettroporazione®**, affermata metodica per la veicolazione transdermica di sostanze senza l'utilizzo di aghi, importanti risultati sono stati ottenuti nell'affrontare anche imperfezioni cutanee come il rilassamento dell'area interna delle braccia (con la formazione di bande di tessuto in eccesso) che trovano soluzione solo con metodiche chirurgiche o altamente invasive e dolorose.

La correzione della ptosi cutanea, correlata alla perdita delle funzioni elastiche e di sostegno, è stata ottenuta con la veicolazione di sostanze rivitalizzanti (**Revitalase**), mediante la metodica di **Dermaelettroporazione®**.

In questo studio è stato sviluppato un protocollo operativo che sinergizza l'effetto dei rivitalizzanti veicolati con la capacità di una strumentazione a LED (Omnilux Revive 633 nm) di condizionare la risposta cellulare.

Protocollo terapeutico per il rassodamento cutaneo.

- Microdermoabrasione a cristalli di corindone presterilizzati nell'area da trattare fino all'iperemia.
- Veicolazione di 1,5 cc di Revitalase (Acido Jaluronico arricchito con fattori di crescita epiteliali) per braccio
- Foto-biomodulazione LED rosso 633+/-6 nm

1 applicazione ogni settimana per un totale di 5-8 sedute



Before

After

